



Nebulizador portátil de rede vibratória ativa

AVISO IMPORTANTE

Antes de usar, leia com atenção e siga as orientações. Em caso de dúvidas, leia o manual do usuário.




0800 773 0130

sac@glenmarkpharma.com



! RECOMENDAÇÕES ANTES DO USO


MONTAGEM E INALAÇÃO COM O NEBZMART

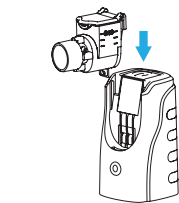

- 1 Posicione o Copo de Nebulização.




- 2 Coloque o líquido a ser nebulizado.

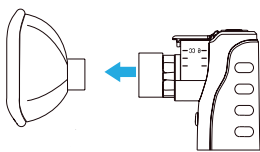


- 3 Encaixe a máscara no aparelho.



- 4 Ligue o aparelho pressionando o Botão Liga/Desliga. A seguir, posicione a máscara contra nariz e boca.

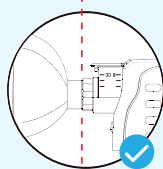


Limite do encaixe da máscara

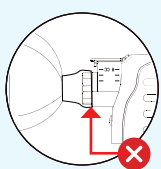


Uso incorreto, com a máscara pressionada além do limite

! CUIDADO: encaixe a **máscara** até o limite indicado na figura, sem forçar, para **não obstruir** as aberturas de ventilação.

DESMONTAGEM

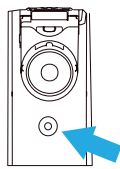


- 1 Aperte levemente o botão para liberar o Copo de Nebulização.

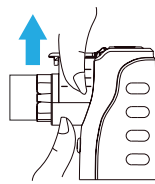


- 2 Puxe o Copo de Nebulização para cima.

INSERINDO AS PILHAS

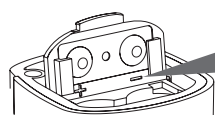


- 1 Vire a unidade de cabeça para baixo.


POLOS DAS PILHAS (+) E (-)

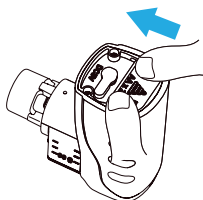

- 2 Pressione suavemente, com os polegares, a tampa do compartimento de pilhas. Deslize no sentido do bocal e levante-a.

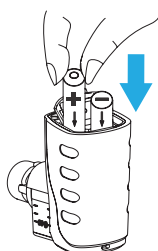

- 3 Insira duas alcalinas AA ou duas pilhas recarregáveis AA/Ni-MH, de acordo com a polaridade indicada na tampa do compartimento de pilhas (ver figura acima).

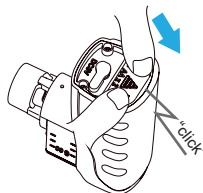

- 4 Feche a tampa do compartimento de pilhas pressionando e empurrando no sentido indicado até fazer um clique e travá-la.

! O desempenho do aparelho depende de vários fatores, incluindo o estado das pilhas.

USANDO O CABO DE ENERGIA (CABO USB)




- Remova as pilhas antes de usar o cabo USB.
- Entretanto, se não for utilizar as pilhas por longo período, é recomendável removê-las do aparelho.
- O usuário deve usar uma fonte de alimentação certificada conforme norma IEC 60950 e de acordo com a especificação técnica.
- Especificação do adaptador: CC 5V/1A.
- Especificação do conector do adaptador: 3,5 x 1,35 x 9,5 mm.


PARTE INFERIOR DO APARELHO



- 1 Desloque a tampinha protetora da entrada do conector do cabo de força.

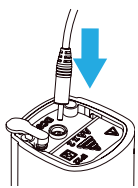

- 2 Insira o conector do cabo de força.

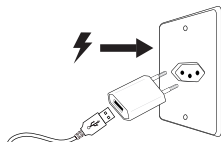

- 3 Insira a parte USB do cabo em um adaptador e conecte-o em uma tomada padrão.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

LIMPEZA APÓS O USO


Remova a máscara ou bocal e lave-os com detergente neutro em água corrente. Em seguida, proceda a limpeza do Copo de Nebulização conforme descrito a seguir.



- 1 Jogue fora o restante do líquido.



- 2 Acrescente um pouco de água filtrada.

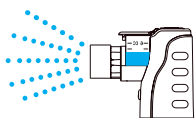


- 3 Ligue o aparelho para nebulizar por 1-2 min para eliminar o resíduo.



- 4 Retire o Copo de Nebulização da unidade. Lave e enxague o Copo de Nebulização.



PARA A LIMPEZA DA UNIDADE PRINCIPAL ONDE ESTÁ O CIRCUITO ELÉTRICO, USE UMA GAZE LEVEMENTE ÚMIDA E PASSE DELICADAMENTE, REMOVENDO AS SUJEIRAS. JAMAIS USE ÁGUA CORRENTE.

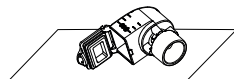


- 5 Remova o excesso de água e deixe o Copo de Nebulização secar em papel toalha ou em uma toalha limpa e seca.

DESINFECÇÃO DO COPO APÓS O USO

Remova a máscara ou bocal e lave-os com detergente neutro em água corrente. Efetue o procedimento de limpeza descrito anteriormente, para somente depois efetuar a desinfecção do Copo de Nebulização conforme descrito a seguir:



- 1 Banhe o copo em água fervente (imediatamente após desligar o fogo). Deixe-o submerso por 10 minutos com a tampa aberta.

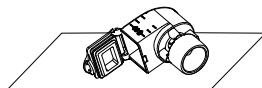

- 2 Deixe o copo secar sobre um papel-toalha ou toalha limpa e seca.



NÃO DEIXE O COPO DE NEBULIZAÇÃO IMERSO EM ÁGUA FERVENTE EM TEMPO MAIOR QUE 10 MINUTOS, POIS ISSO PODE DANIFICAR A MALHA VIBRATÓRIA.



JAMAIS TENTE FAZER A DESINFECÇÃO DO COPO DE NEBULIZAÇÃO USANDO MICRO-ONDAS, ESTERILIZADORES DE MAMAEIRAS OU MESMO EM AUTOCLAVES.




AO UTILIZAR SEU APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO, RECOMENDAMOS FAZER A DESINFECÇÃO APÓS CADA USO.




SE O APARELHO FOR USADO SOMENTE COM SORO FISIOLÓGICO, A DESINFECÇÃO PODE SER FEITA UMA ÚNICA VEZ, NO FINAL DO DIA, APÓS A ÚLTIMA NEBULIZAÇÃO.

RECOMENDAÇÕES ANTES DO USO

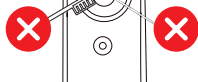

- 1 Não use objetos estranhos ou pontiagudos para furar ou manipular a rede vibratória. Isso pode danificá-la, prejudicando o funcionamento do dispositivo.

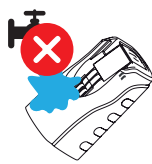

- 2 Não lave com água a Unidade Principal onde está o circuito, pois isso pode danificar o dispositivo.




- 3 Use somente o adaptador de tomada com as especificações descritas no manual.



- 4 Siga as orientações médicas quanto ao uso.

INDICAÇÃO DAS LUZES

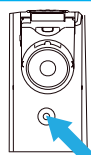

Lâmpada ligada

Ocorrendo funcionamento anormal, consulte no manual a solução para os problemas mais comuns ou contate a revendedora.

- Luz verde acesa ininterruptamente: funcionamento normal
- Luz laranja acesa ininterruptamente: alerta de baixa energia
- Luz laranja piscando: funcionamento anormal